

Aluneb®

KIT HIPERTÓNICO

PR02/19/3/06/19

Aluneb® Hipertónico

Aluneb® Hipertónico es una solución salina hipertónica al 3% para la nebulización nasal, a base de ácido hialurónico de alto peso molecular y xilitol, con acción descongestiva y fluidificante sobre las mucosas nasales. Indicado especialmente para la limpieza de las fosas nasales, sobre todo en caso de resfriado, rinitis y rinitis alérgica, sinusitis, otitis y todos los estados congestivos de las mucosas nasales.

El **ácido hialurónico** nebulizado hidrata y facilita la eliminación del moco y los alérgenos de las vías respiratorias superiores. Puede ser útil en la regulación del aclaramiento mucociliar, aliviando todos los síntomas ligados a factores inflamatorios, alérgicos y ambientales. Crea una capa protectora e hidratante con efecto barrera. Ayuda a la cicatrización postquirúrgica de la mucosa nasal. Reduce la capacidad de adhesión bacteriana.

El **Xilitol** ayuda a fluidificar el moco. Reduce la capacidad de adhesión bacteriana. Ayuda a reducir los episodios de otitis media, rinitis y sinusitis.

Indicaciones:

- Coadyuvante en el tratamiento de la amigdalitis, laringitis, faringitis, rinitis, sinusitis y otitis.
- Libera la nariz del moco, favoreciendo la eliminación de las excesivas secreciones nasales.
- Afecciones rinofaríngeas caracterizadas por congestión y alteración del aclaramiento mucociliar.
- En el postoperatorio de cirugía nasal.
- Hidrata las vías respiratorias y estimula el aclaramiento mucociliar.
- Facilita la respiración, la alimentación y el sueño de los lactantes.
- En aerosolterapia, puede ser utilizado como coadyuvante en el tratamiento de la bronquiolitis.
- En aerosolterapia puede ser utilizado para diluir medicamentos.

Composición de un vial: cloruro de sodio, hialuronato de sodio, xilitol, fosfato potásico monobásico, fosfato potásico dibásico, agua de mar y agua.

Modos de Uso:

La solución Aluneb® hipertónico puede ser utilizada para nebulizar en aerosolterapia, ducha nasal o mediante Aluneb® Dispositivo de Nebulización Nasal.

Posología:

Uso con dispositivo de nebulización o ducha nasal:

Niños hasta 6 años: Según necesidad, de 1 a 2 viales, 1 ó 2 veces al día.
Niños de más de 6 años y adultos: Según necesidad, de 1 a 2 viales, 2 ó 3 veces al día.

Reparta el contenido del vial entre las dos fosas nasales.

Lactantes: Aplicar directamente algunas gotas en la nariz.

Se recomienda realizar los lavados preferiblemente al levantarse, antes de las comidas y antes de acostarse.

Uso en aerosolterapia:

Siga los consejos indicados por su médico. De forma general 1 ó 2 viales/2-3 veces al día.

No utilizar en aparatos de ultrasonidos.

Modo de empleo:

1. Lavarse las manos antes y después de la aplicación.
2. Mover el vial monodosis en direcciones opuestas y separarla de la tira a la que está adherida.
3. Abrir el vial monodosis girando las aletas.
4. Depositar el contenido del vial en el recipiente de nebulizador o aspirar en la jeringa del Dispositivo de Nebulización Nasal MAD Nasal™ siguiendo las instrucciones del dispositivo.

Frecuencia de uso: la duración del uso depende de la evolución de los síntomas. Si es necesario puede administrarse por un período prolongado.

Embarazo y lactancia: la seguridad del uso de Aluneb® hipertónico solución para nebulización durante el embarazo y la lactancia no ha sido establecida. Bajo dichas circunstancias, se aconseja consultar con el médico.

Advertencias: mantener fuera del alcance y la vista de los niños. Evitar el contacto con los ojos. No ingerir. Conservar el embalaje bien cerrado en un lugar seco, al abrigo de la luz. No utilizar el producto si el embalaje no está cerrado. No utilizar el producto después de la fecha de caducidad. La fecha de caducidad se indica en el embalaje y en cada vial monodosis. No superar la dosis aconsejada sin la opinión del médico. El uso, especialmente si es prolongado, de cualquier producto de uso tópico, puede dar lugar a fenómenos de sensibilización. Si se diera el caso, interrumpir el tratamiento y consultar con el médico a fin de establecer la terapia idónea. Si se produjeran efectos adversos descritos o no en el presente prospecto informativo, informar al médico o al farmacéutico. En niños de menos de un año, y en caso de asma bronquial, suministrar bajo tutela del médico. Si se están utilizando simultáneamente otros productos, verificar las interacciones. Después del uso, eliminar las ampollas incluso si contienen residuos del producto: la eventual reutilización podría causar infección al paciente. No debe utilizarse en caso de hipersensibilidad o alergia demostrada hacia alguno de los componentes u otras sustancias químicas relacionadas.

Indicado para bebés, niños y adultos.

No contiene conservantes.

 Sakura Italia Srl
Via M. Cerutti, 90/c
25017 Lonato del Garda (BS) - Italia
www.sakuraitalia.it

Distribuido por:
LABORATORIOS CINFA, S.A.
Olaz-Chipi, 10 P.I. Areta
31620 Huarte (Navarra)
ESPAÑA

Rev.03_11/2018



Aluneb® Dispositivo de Nebulización Nasal, MAD Nasal™

MAD Nasal™ es un dispositivo médico, sin aguja, para la nebulización de soluciones tópicas por vía nasal. Permite efectuar tratamientos tópicos de las cavidades nasales y sinusales, y posibilita la administración rápida de la solución Aluneb® mediante nebulización en partículas de un tamaño de 30-100 micras de diámetro, ideales para la terapia de las vías aéreas superiores. MAD Nasal™ es un dispositivo utilizado en el ámbito prehospitalario y de primeros auxilios, para la administración de anestésicos, anticonvulsivos y analgésicos por vía intranasal. Gracias a su adaptador cónico blando se mantiene en la nariz y se adapta de forma ergonómica a los orificios nasales de adultos y niños. La boquilla flexible permite el posicionamiento en 180° del adaptador cónico.

Instrucciones de uso:



1. Separar el Dispositivo de Nebulización Nasal desenroscándolo de la jeringa suministrada
2. Abrir el vial monodosis girando las aletas
3. Conectar el vial a la jeringa y aspirar la mitad de la solución contenida en el vial.
4. Fijar el Dispositivo de Nebulización Nasal enroscándolo en la jeringa.
5. Insertar la punta del Dispositivo de Nebulización Nasal en un orificio nasal. Mantener el torso erguido. Pulsar enérgicamente el pistón de la jeringa para nebulizar la solución.

Repetir la operación del punto 3 al punto 5 para el otro orificio nasal.

Limpieza del dispositivo nebulizador MAD Nasal™: está diseñado para su utilización por un solo paciente, pero puede ser utilizado varias veces. Por este motivo es muy importante la limpieza cuidadosa del dispositivo después de cada utilización a fin de asegurar la duración y el buen funcionamiento. Lavar MAD Nasal™ bajo un chorro de agua templada. Antes de volver a usar MAD Nasal™ secarlo cuidadosamente con un paño suave o con un chorro de aire caliente.

Advertencias: no utilizar MAD Nasal™ después de la fecha de caducidad que figura en el embalaje. No utilizar MAD Nasal™ si el embalaje está abierto o dañado. Mantener MAD Nasal™ lejos de las superficies calientes y protegerlo de los rayos solares. Conservar en un lugar seco a entre +5°C y +25°C. No congelar. Antes de cada utilización, verificar que el dispositivo MAD Nasal™ no esté dañado; si lo está, no utilizarlo para la nebulización. Para su reutilización, efectuar su limpieza siguiendo las instrucciones bajo el punto "Limpieza del dispositivo nebulizador MAD Nasal™". El dispositivo no debe ser utilizado para más de 100 pulverizaciones y nunca durante más de un mes. El uso de MAD Nasal™ por los niños o por personas no autosuficientes debe realizarse bajo la supervisión de un adulto que haya leído las presentes instrucciones de uso. Se aconseja consultar con el médico antes de utilizar MAD Nasal™. Mantener fuera del alcance y la vista de los niños. La utilización en varios pacientes de los productos previstos para su utilización en un solo paciente puede provocar una degradación de las prestaciones o comprometer el funcionamiento de los productos, y puede causar exposición a agentes patógenos. Para estos productos no existen métodos de limpieza y esterilización homologados, ni instrucciones para el reacondicionamiento según las especificaciones originales.

Para uso exclusivo en un único paciente.

Indicado para niños y adultos.

Contenido del embalaje:

- 20 viales de 5 ml de Aluneb® hipertónico
- 1 Dispositivo para Nebulización Nasal MAD Nasal™, 1 jeringa Luer Lock de 3 ml.

Especificaciones técnicas:

Dimensiones típicas de las partículas: 30-100 micras
Espacio vacío del sistema MAD100 = 0,15 ml
Diámetro de la punta 0,17 pulgadas (4,3 mm)
Longitud del aplicador 1,69 pulgadas (4,3 cm)
Exactitud de la jeringa MAD100: +/- 5%

 Teleflex Medical
3015 Carrington Mill Blvd
Morrisville, NC 27560
USA

Concesionario exclusivo:
Sakura Italia Srl
Via M. Cerutti, 90/c
25017 Lonato dal Garda (BS), Italia
www.sakuraitalia.it

Distribuido por:
LABORATORIOS CINFA, S.A.
Olaz-Chipi, 10 P.I. Areta
31620 Huarte (Navarra)
ESPAÑA

